



LED MASK
7 colores
5 intensidades



www.inlabmed.es



MÁSCARA LED
Belleza facial integral

www.inlabmed.es

DEFINICIÓN

LED: Diodo emisor de luz.

Belleza integral para la piel del rostro

Método descubierto por la NASA que proporciona excelentes resultados a la hora de reafirmar la piel y tonificar los músculos faciales. La terapia de LED utiliza longitudes de ondas específicas que emiten energía.

La máscara LED de fototerapia facial reactiva la actividad celular desde las capas más profundas de la piel. La energía de la luz se convierte en energía intracelular, fortaleciendo los capilares.

EFECTOS

Este tratamiento no produce dolor, calor ni irritaciones.


- Efecto inmediato: hidratación, descongestión y desinfección.
- A largo plazo: Mejora la textura, apariencia y luminosidad de la piel.



Unifica el tono de la piel



Tratamiento del acné

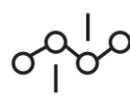

Activador celular



Alisamiento de la superficie de la piel



Regulación de la producción de grasa

6 Sesiones recomendadas (20-30 min.)

1 mes: 2 sesiones monocolor por semana
Si se combinan 2 colores: 10-15 min. cada uno.

Mantenimiento:
1 sesión semanal.

PRECAUCIONES

Prohibido su uso en embarazadas, niños, personas epilépticas, con tiroides, con problemas dermatológicos y en alérgicos a la luz o a medicamentos.

- La máscara debe cubrir la cara, dejando las orejas descubiertas.
- Ajustar de manera segura las bandas. Colocar la máscara antes de ajustar la intensidad de la luz.
- Es recomendable tumbarse en una camilla o sofá, con los ojos cerrados.
- Cerrar los ojos, utilizar algodones o gafas para cubrirlos.
- Prohibido el contacto de los ojos con la superficie de la luz o mirar a la misma.
- La película luminiscente de dentro del circuito y de las luces LED, no se puede doblar ni aplastar.
- No moje la máscara.
- Límpiela con un paño húmedo. La banda elástica si se puede lavar. No utilice soluciones químicas corrosivas para limpiar la máscara.
- Evitar la luz solar sobre la máscara.
- Si nota algún efecto incómodo consulte a su médico.

TRATAMIENTOS

	Productos	Luz LED	Terminación
ELASTICIDAD	Growth factor 1 + Hyaluronic acid 1% + DMAE 3%	Roja ●	1. Máscara de Bio Gel DN64. 2. ampolla Peptigenol. 3. Protección solar (eventualmente)
ANTI-ACNÉ	HYALURONIC + DMAE + SILICIO + Hydropeeling	Azul ●	
ANTIMANCHAS	Growth factor 1 + Hyaluronic acid 1% + Vitamina C 5%	Verde ●	
LUMINOSIDAD	Hyaluronic acid 3% + Vitamina C 5% + Proteolycons	Amarilla ●	
CICATRIZANTE	Hyaluronic acid 1% + DMAE 3% + Hydropeeling	Violeta ●	
DESCONGESTIONANTE	Growth factor 2 + Hyaluronic 3% + DMAE 3%	Azul clara ●	
ANTIAGING	HYALURONIC + DMAE + SILICIO + Growth factor 2	Blanca ○	

PROTOCOLO

- 1 **Limpieza facial.** Realizar una limpieza de cutis y secar de manera suave.
- 2 **Aplicar el producto.** Elegir protocolo según necesidades del cliente.
- 3 **Colocar la máscara y encenderla.** Se ajustan las bandas de la máscara y se conecta el cable de alimentación. Presionar POWER Switch, después ON/OFF y los fotones LED se encienden. Elegir el tipo de luz (rojo, azul, celeste, verde, violeta, amarillo, blanco). Ver "PRECAUCIONES"
- 4 **Fijar intensidad y tiempo.** Intensidad del 1 al 5 se recomienda medio-bajo. Duración de 15 a 30 minutos. Al terminar apagar la máscara, retirar y limpiarla.
- 5 Aplicar en el rostro una **máscara de bio gel DN64**. Para finalizar aplicar una ampolla **Peptigenol**. En caso de que el cliente fuera a exponerse a luz del sol aplicar crema de protección solar.
- 6 **Mantenimiento.** Utilizar habitualmente los productos recomendados para cada tratamiento.

FUNCIONAMIENTO

7 colores para distintos tratamientos

Se pueden combinar 2 colores según el tipo de piel del cliente. Cada color no debe superar los 10/15 minutos. La sesión en total no debe sobrepasar 30 minutos.

- **LUZ ROJA: Elasticidad**
Estimula la producción de colágeno y elastina. Repara el tejido dañado ayuda a su cicatrización. Mejora manchas y ojeras. Reduce finas líneas de expresión y poros dilatados.
- **LUZ AZUL: Anti-acné.** Atenúa rojeces. Penetra profundamente en la piel. Disminuye los poros dilatados y previene la aparición de granitos. Produce una bioestimulación que incrementa los mecanismos naturales de reparación consiguiendo una mejora en el aspecto de la piel. Propiedades anti-inflamatorias.
- **LUZ VERDE: Anti-manchas**
El balance de la luz verde puede mejorar las manchas de la piel. Reduce las finas líneas de expresión. Ayuda a regenerar los nutrientes en la piel.
- **LUZ AMARILLA: Luminosidad**
Mejora el intercambio de oxígeno en las células para reponer su energía, mejorando el drenaje linfático. Suaviza la piel áspera y mejora las arrugas, aportando luminosidad a la piel.
- **LUZ VIOLETA: Cicatrizante**
Utilizando la luz roja y azul se combinan dos efectos fototerápicos. Repara marcas de acné y alivia rojeces.
- **LUZ AZUL CLARA: Descongestionante.** Hidratante. Puede mejorar gradualmente la energía celular, teniendo un buen efecto en el metabolismo.
- **LUZ LASER (BLANCA): Anti-aging**
Penetra profundamente en la piel, acelerando el metabolismo en los tejidos. Mejora las líneas de expresión y la piel flácida.

