


- 1 Desmaquillar el labio con agua micelar HYDROLAB y limpiar con suero fisiológico.
- 2 Dibujar el contorno del labio con un lapicero blanco por el borde exterior.
- 3 Aplicar con el INLABPEN, el CCGLOW LIPS del color elegido en la mitad del labio superior desde la comisura hasta el corazón, (área A) empleando un ligero movimiento de vaivén.

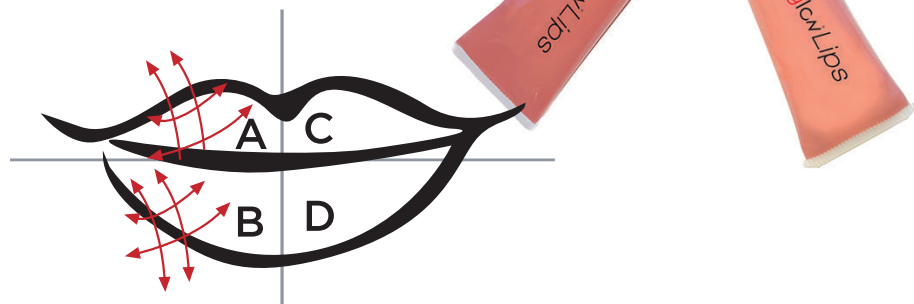

- 4 Aplicar el paso 3 a la mitad labio inferior (área B).
- 5 Retirar el producto y repetir el paso 3, 5 veces.



- 6 Aplicar de nuevo el CCGLOW LIPS en la misma mitad del labio superior (área A) en movimientos verticales y transversales.
- 7 Aplicar el paso 6 a la misma mitad del labio inferior (área B).
- 8 Retirar el producto y repetir 3 veces.
- 9 Repetir los pasos 3,4,5,6,7 y 8 en la otra mitad del labio superior e inferior. (áreas C y D).



- 10 Terminar el procedimiento aplicando el bálsamo MIEL D'ARGÁN.